

Gt.

GARNIER-THIEBAUT

FRANCE


Masque catégorie " UNS 1 & UNS 2 " :
masque individuel à usage des
professionnels en contact avec le public

Kit avec masque
& tiges métalliques pince-nz
Réf. MAS100
BP39 - 88401 Gérardmer cedex



Filaments élasthanne

Ce masque technique a été conçu avec
des filaments élasthanne pour améliorer la
résistance et le confort sur les oreilles.

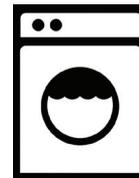

Avant la première utilisation et après
chaque utilisation, laver en machine avec
de la lessive, à un programme comprenant
au minimum un cycle de 30 minutes à 60°C.
Séchage mécanique ou conventionnel, suivi
dans les 2 cas d'un repassage vapeur.


Masque homologué selon les tests
de la Direction Générale des Armées.

Rapport RP/20-2215/DGA

MNRBC/2000305/N

Efficacité de filtration
des particules de 3µm : 96%
(norme UNS1 > 90%)
(norme UNS2 > 70%)

Respirabilité : essai de perméabilité à l'air
120 L.m².S-1 pour une dépression
de 100 Pa (norme UNS1 & 2 > 96 L.m².S-1)

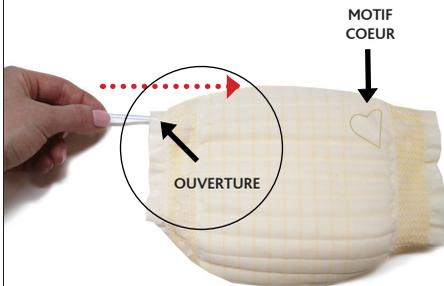

Insérer la tige métallique en écartant
l'ouverture en haut à gauche à l'opposé du
motif coeur, sur l'extérieur du masque.



Pour prolonger la durée de vie de vos
masques, nous vous conseillons de les laver
dans un filet de protection.